

Memas


**Life Mastering Assistant –
for dem som ikke husker så godt**

Terje Grimstad, Daglig leder Karde og Mylifeproducts
Januar 2020


Situasjonsbeskrivelser

- De fleste eldre mennesker ønsker å bo i eget hjem lengst mulig.
- Det blir stadig flere eldre som bor alene. De fleste er kvinner.
- Helsetilstanden kan påvirkes av ufrivillig ensomhet.
- Nærmeste familie utgjør det viktigste sosiale nettverket og hjelp til aktiviteter.
- Pårørende opplever stress.
- Svært mange av pårørende til personer med demens utvikler depresjon.
- Bruk av teknologi kan gi muligheter for velvære, mestring, trivsel, trygghet – livskvalitet.

Utfordringer når hukommelsen svikter

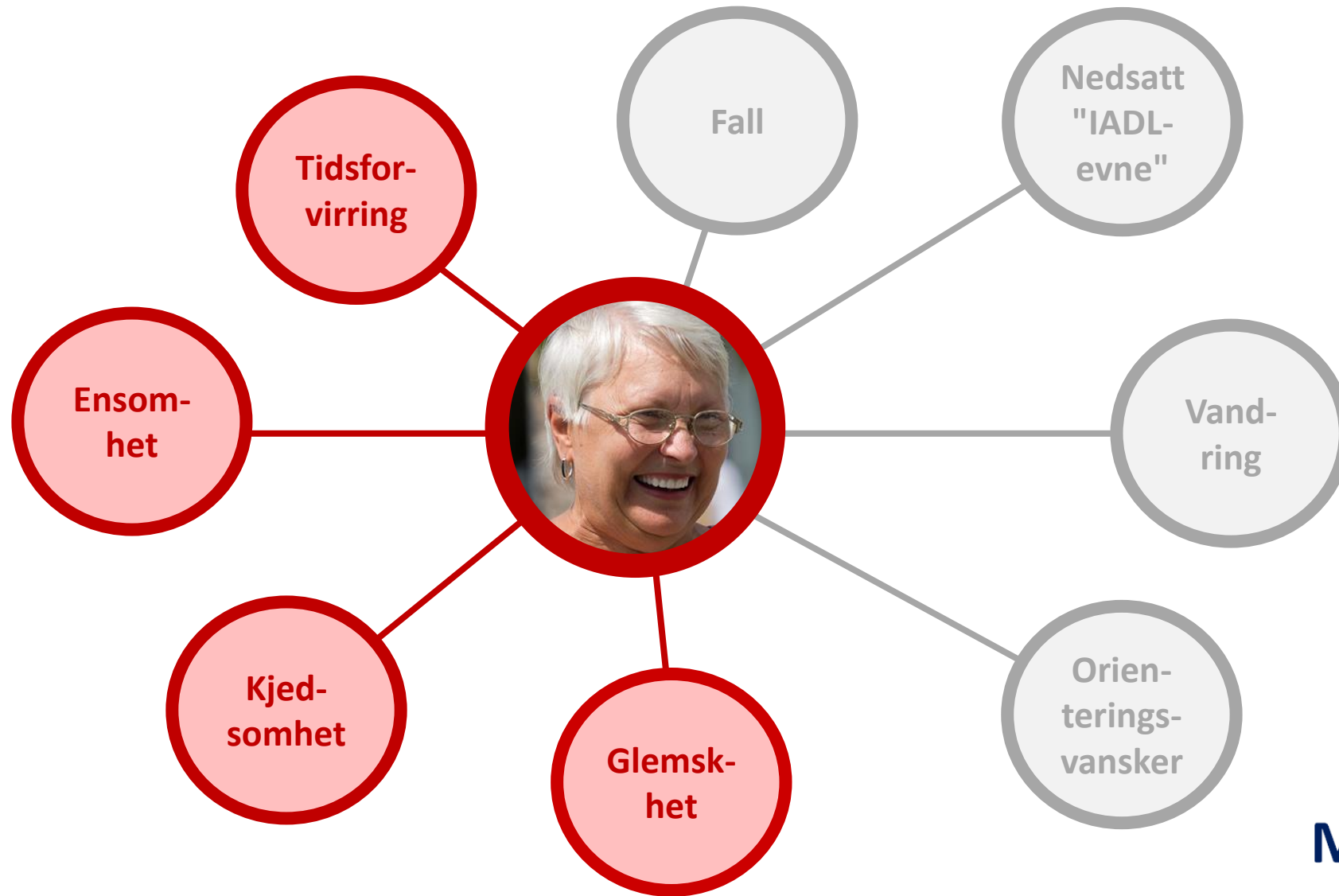

Utfordringer for mennesker med utviklingshemning

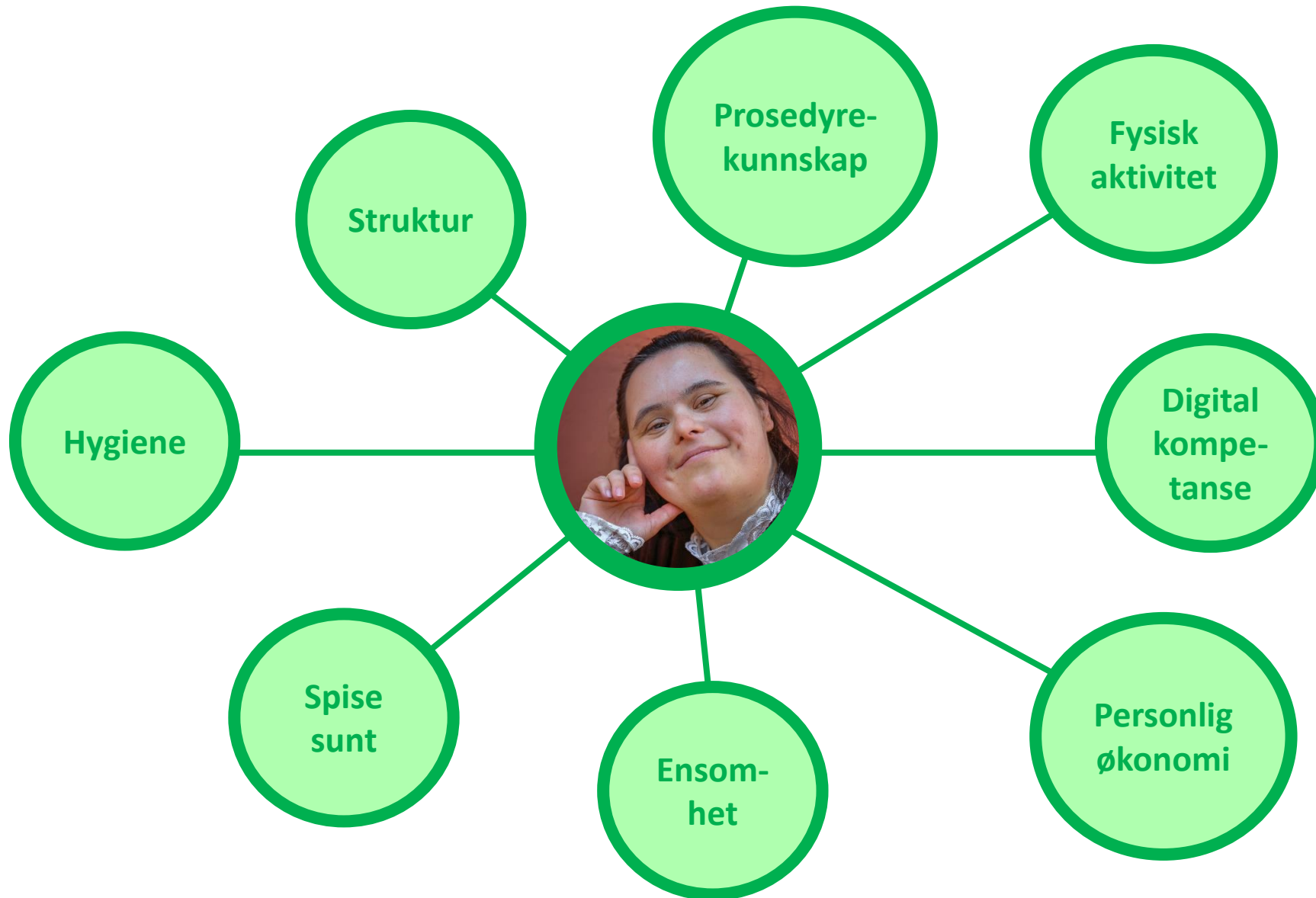

Fra prosjekt til produkt



Mylife

Tidsorientering,
trivsel,
mestring




T&Tnet

Navigering,
sosial
plattform



PIA

Støtte til
dagligvites
aktiviteter
hjemme

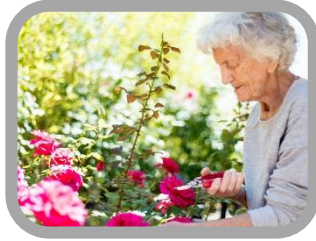

Home4Dem


Bo alene
hjemme,
utvikling av
demens



MedGUIDE

Bo alene
hjemme,
medisinering

AAL JP-prosjekter

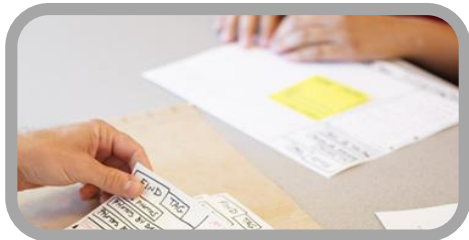


Aldern

Behovskartlegginger
og papirprototyper



Sampo

Forenkling av
tjenester fra nett

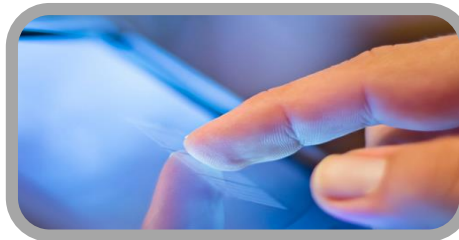

TouchIT

Brukergrensesnitt på
berøringsskjerm

Forprosjekter

Demonstrasjon av Memas

Hva er Memas

Spesielt tjenester for personer med demens handler ikke bare om trygghet, men også å bidra til et mer interessant liv, kognitiv trening og stimulere restevnen som fins i hver av dem på ulike stadier av sykdommen.

1. Huskehjelp: oppgradert kalender for strukturering av hverdagen med bilder for å illustrere gjøremålet
2. Tjenester for å styrke restevnen hos personer med demens
3. Velvære og adspredelse
4. Mestring

Lett å forstå

Mandag 17. september 2012

8:00 Medisiner

10:20 - 10:50 Besøk av Per
Det er 1 minutt til denne avtalen.
Per kommer på besøk. Husk noe godt til ka...

14:00 Middag



MORGEN

I dag Kalender Til glede Kontakt meg Lyd er på

Radio

Trykk på en kanal i lista for å spille

NRK P1: Spiller nå
Trykk for å slå av

NRK P2

NRK Alltid nyheter

NRK Klassisk


I dag Kalender Til glede Kontakt meg Lyd er på

Følgende funksjoner finnes

- I dag
- Kalender
- Til glede
 - Bilder
 - Radio
 - Aviser
 - Min side
 - Været
- Kontakt meg
- Kan skifte farge
- Kan forenkle



... også for pårørende

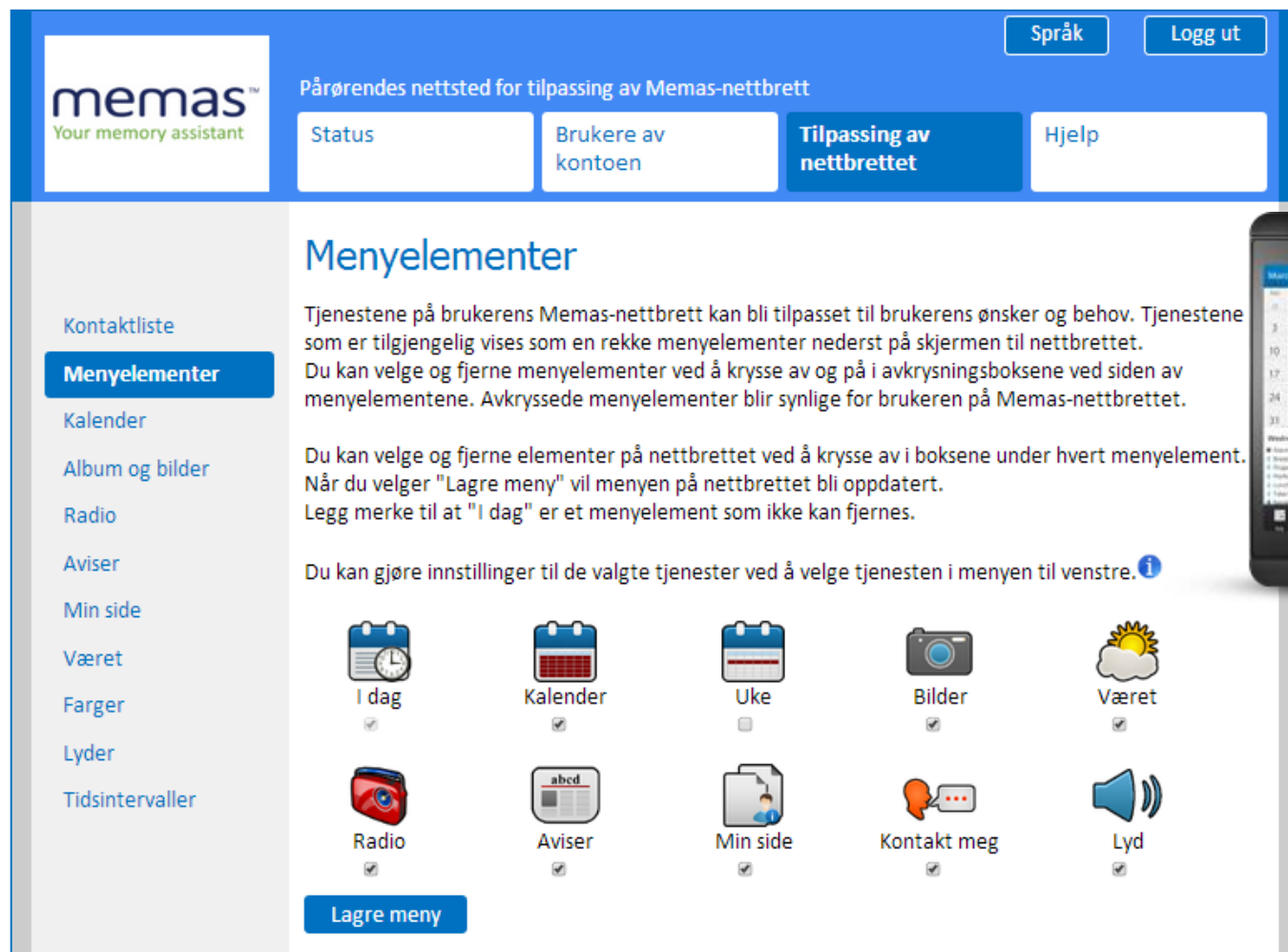

memas™
Your memory assistant

Pårørendes nettsted for tilpassing av Memas-nettbrett


Språk Logg ut











Status Brukere av kontoen **Tilpassing av nettbrettet** Hjelp

Menyelementer


Tjenestene på brukerens Memas-nettbrett kan bli tilpasset til brukerens ønsker og behov. Tjenestene som er tilgjengelig vises som en rekke menyelementer nederst på skjermen til nettbrettet. Du kan velge og fjerne menyelementer ved å krysse av og på i avkrysningsboksene ved siden av menyelementene. Avkryssede menyelementer blir synlige for brukeren på Memas-nettbrettet.

Du kan velge og fjerne elementer på nettbrettet ved å krysse av i boksene under hvert menyelement. Når du velger "Lagre meny" vil menyen på nettbrettet bli oppdatert. Legg merke til at "I dag" er et menyelement som ikke kan fjernes.

Du kan gjøre innstillinger til de valgte tjenester ved å velge tjenesten i menyen til venstre. 

 I dag <input checked="" type="checkbox"/>	 Kalender <input checked="" type="checkbox"/>	 Uke <input type="checkbox"/>	 Bilder <input checked="" type="checkbox"/>	 Været <input checked="" type="checkbox"/>
 Radio <input checked="" type="checkbox"/>	 Aviser <input checked="" type="checkbox"/>	 Min side <input checked="" type="checkbox"/>	 Kontakt meg <input checked="" type="checkbox"/>	 Lyd <input checked="" type="checkbox"/>

Lagre meny



Pårørendes nettsted

- Alle funksjoner kan administreres herfra
- Det er enkelt å legge til eller ta vekk funksjoner
- Det er enkelt å legge til eller ta vekk kontaktpersoner
- Man kan se status på nettbrettet
- Man kan se på brukshistorikken

Hva gjør dette for brukerne?

- Får tilbake kontrollen over egen hverdag
- Har noe å samtale om
- Kan hygge seg med musikk
- Får huskeassistanse
- Vet når hjemmehjelpen kommer

- Mindre angst
- Større trygghet

Hva gjør dette for hjelperne?

- Mindre stress
- Større trygghet
- Mindre dårlig samvittighet
- Bedre koordinering av aktiviteter knyttet til brukeren
- Flere generasjoner tar naturlig del i omsorgen



1

Mylife products AS

Registrer dere på www.mylifeproducts.no. Skriv inn navnet til den som skal legge inn informasjon, og til den som skal motta.

2

Kjøp et Android nettbrett. Husk simkort dersom det ikke er trådløst nettverk der brettet skal stå

3

memas™ Your memory assistant

Last ned MEMAS på nettbrettet.

4

Logg inn som administrator på www.mylifeproducts.no. Tilpass utseende og innhold på nettbrettet fra datamaskinen.

5

Da er dere igang! Velkommen som bruker av MEMAS.

Mer informasjon

www.mylifeproducts.no

post@mylifeproducts.no

terje.grimstad@karde.no

Terje Grimstad, tel 908 44023